


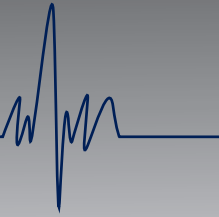

Solutions Start Here...



**Solutions Start Here**

[www.smpcanada.com](http://www.smpcanada.com)

**SMP Canada**

10 Sims Crescent, Richmond Hill  
Ontario, L4B-1K9 Canada  
Tel: (905) 764-7767 Fax: 1-866-627-9798  
[support@smpcanada.com](mailto:support@smpcanada.com)

## Bed Docker

This product conforms to UL and CSA standards

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



# INSTALLATION INSTRUCTION

## BED DOCKING STATION **BED DOCKER**



Antes de dar servicio o instalar esta unidad, por favor asegúrense que toda fuente de gas o electricidad en el área de uso, este desconectada o cerrada. Por favor usen cuidado y precaución a todo tiempo.

### Antes de Instalar

Los localizadores de cama deben ser instalados por un técnico certificado. Todo el trabajo debe cumplir con los códigos de construcción locales. Instrucciones de instalación son proveídos como una base de instalación para los localizador de cama de SMP. Cambios menores o modificaciones pueden ocurrir en cada sitio de trabajo.

Favor de leer todas instrucciones antes de instalar el localizador de cama.

El paquete de aprobación tiene que ser revisado contra la lista de equipo y dibujos antes de retirar los localizadores de cama de su contenedor. Asegúrese que la siguiente información esta correcta antes de instalar:

- Tipo de equipo y cantidades coinciden con el envío
- Numero de cuarto aparece en cada paquete (si lo fue pedido)

Favor de revisar todo dibujo de aprobación, mecánico, cableado, y puntos de ensamble, antes de proceder con la instalación. Si existe alguna discrepancia, favor de contactar a SMP Canada antes de proceder con la instalación. ([support@smpanada.com](mailto:support@smpanada.com))




# INSTALLATION INSTRUCTION

## BED DOCKING STATION **BED DOCKER**

### Instalación de un Localizador de Cama


- 1 Para poder instalar el localizador de cama primero se debe desprender la parte frontal del mismo (área de contactos) para que quede al descubierto la parte de las instalaciones eléctricas y data.
- 2 Posicione el localizador de cama contra la pared en el sitio deseado.

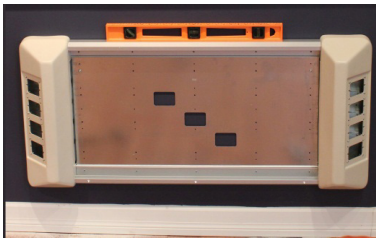

- 3 JAlcé o apoye encima de bloques de madera, a la altura deseada.



- 4 Localicé hoyos ya pre hechos a lo largo de la placa de montaje.
- 5 Ponga una marca en la pared a través de los hoyos – quite unidad
- 6 Perforar agujeros en la pared para los tornillos

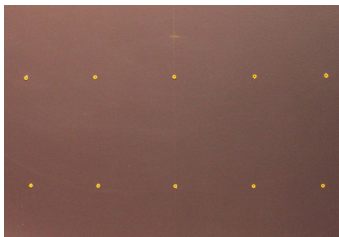

- 7 Ponga unidad de regreso en la pared, atornille el localizador de cama a la pared a través de los hoyos pre hechos.



# INSTALLATION INSTRUCTION

## BED DOCKING STATION BED DOCKER

### Conexiones Eléctricas

- 1 Introduzcan el cableado eléctrico a través del conducto de la caja de instalación y asegúrelo al terminar al bloque de ajuste.
- 2 Reemplazca la parte frontal (área de contactos), placas de acero inoxidable.



- 3 Ponga a prueba todo circuito eléctrico.
- 4 Usando la copa de succión suplida por SMP, instale laminado de plástico primero en el canal adecuado al lado superior, posicione laminado contra la unidad, y después deslice hacia el canal correspondiente del lado debajo..



- 5 Asegure laminado de plástico con los tornillos.







